

DANE TECHNICZNE

ATTITUDE	Manual	Hybrid	Power
Max. waga użytkownika	100 kg	100 kg	100 kg
Szerokość ramy przedniej	26 – 46 cm	26 – 46 cm	26 – 46 cm
Waga elementów montażowych na ramie wózka	170 g	170 g	170 g
Waga przystawki rowerowej	14,5 kg	21,5 kg	15,3 kg
Rozmiar kół	20"	20"	16"
Maksymalna prędkość	–	23 km/h	6 km/h & 23 km/h
Silnik	–	250 W	250 W
Akumulator	–	14,5 Ah	9 Ah & 13,4 Ah
Typ manetki przerzutki	Trigger / Grip shift	Trigger / Grip shift	–
Prędkość przerzutki	8 & 30	10	–
Szerokość korby typu V-crank	470 mm	470 mm	–
Długość korby typu V-crank	170 mm	170 mm	–
Szerokość regulowanej kierownicy	–	–	570 mm
Hamulec	Tarczowy (160 mm)	Tarczowy (160 mm)	Tarczowy (160 mm)
Hamulec postojowy	tak	tak	tak
Kolor ramy	31	31	31



W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia na naszej stronie internetowej. Ten dokument dostępny jest również w wersji PDF na www.Sunrise-Medical.pl



Sunrise Medical Sp. z o.o.

Elektronowa 6

94-103 Łódź

Tel.: +48 42 275 83 38

Fax: +48 42 209 35 23

E-Mail: pl@sunrisemedical.pl

www.Sunrise-Medical.pl



ATTITUDE NIEOGRANICZONA WOLNOŚĆ



CAŁA RODZINA ATTITUDE



Nowa przystawka rowerowa do wózka inwalidzkiego Attitude zapewnia niespotykane dotychczas poczucie wolności

Przystawka Attitude sprawdza się doskonale w przypadku użytkowników, którzy chcą ćwiczyć bądź zwiększyć swoją mobilność. Wersja Manual to lekka, poręczna konstrukcja. Jeżeli potrzebna jest wersja z napędem, na wypadek gdyby użytkownik się zmęczył, należy wybrać wersję Hybrid. Z kolei Attitude Power to mobilność z pełnym napędem elektrycznym.

ATTITUDE Manual

SPORTOWY CHARAKTER



ATTITUDE Hybrid

WSZECHSTRONNOŚĆ



ATTITUDE Power

MOC




GOTOWOŚĆ W KILKA SEKUND

Pomysłowy mechanizm w przystawce rowerowej Attitude pozwala przymocować ją do wózka w zaledwie kilka sekund... i równie szybko ją odpiąć. To doskonałe rozwiązanie, gdy nie ma czasu do stracenia lub gdy użytkownik się spieszy.

Mechanizm łączący w przystawce rowerowej Attitude mocowany jest do przedniej części wózka inwalidzkiego, bez konieczności stosowania dodatkowych części lub pętlaniny przewodów wokół kolan. Nic zatem nie zakłóca wygody, jakiej użytkownicy oczekują od swoich wózków.

Po odłączeniu pozostają jedynie dwa niewielkie bolce (170 g) i wózek.

- 1 Umieścić bolce łączące na swoim miejscu.
- 2 Przesunąć górne złącze do dołu.
- 3 Zablokować złącze, pociągając czerwoną dźwignię.

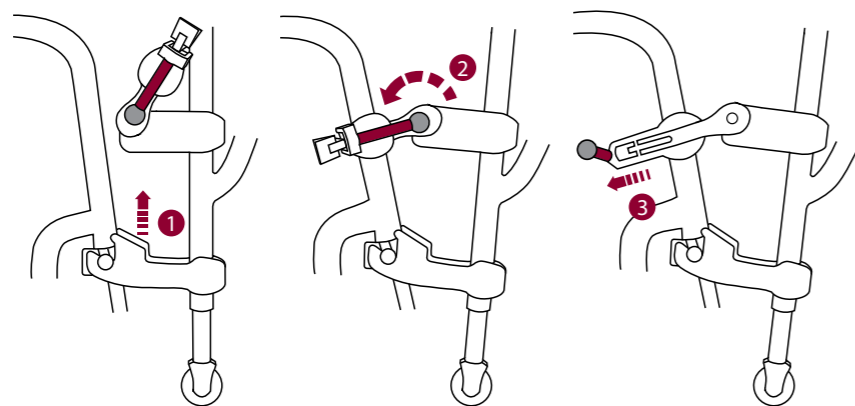

→ Dostępny jest film prezentujący montaż przystawki Attitude!

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=R5BMLQ1HHNG](https://www.youtube.com/watch?v=R5BMLQ1HHNG)

WIĘKSZA WOLNOŚĆ

Wolność, jaką zapewnia przystawka Attitude, nie ogranicza się jedynie do jazdy. Ergonomiczny uchwyt i kółka postojowe ułatwiają manewrowanie przystawką za pomocą jednej ręki. Dzięki temu zarówno demontaż przystawki, jak i jej chowanie nie wymagają wysiłku, bez względu na sytuację.



STYL ZAWSZE I WSZĘDZIE

Lekka, stylowa przystawka rowerowa Attitude stanowi doskonałe uzupełnienie wózka Quickie. Dzięki aerodynamicznej, nowoczesnej konstrukcji i gamie 31 atrakcyjnych kolorów, przystawkę Attitude można w prosty sposób spersonalizować pod kątem wyjątkowej osobowości użytkownika.



ATTITUDE

MANUAL – SPORTOWY CHARAKTER



Attitude Manual to doskonały wybór dla osób, które chcą się wzmocnić i rozwijać swoją wytrzymałość poprzez rekreacyjną jazdę na rowerze. Przednie koła o średnicy 20" i 30-biegowa przerzutka gwarantują wyjątkowy komfort jazdy w każdych warunkach. Ponadto potężny hamulec tarczowy zapewnia płynną kontrolę prędkości. Lekka, łatwa w obsłudze konstrukcja to doskonałe uzupełnienie wózka inwalidzkiego dla aktywnych.

Manual



MANUAL | HYBRID | POWER



// PRZERZUTKA DUAL DRIVE (3X10)

30-biegowa przerzutka doskonale sprawdza się w każdych warunkach. Hamulec tarczowy umożliwia płynne sterowanie



// MANETKA TYPU GRIP SHIFT

Obsługiwana w prosty sposób jedną ręką manetka umożliwia szybką i bezproblemową zmianę biegów.



// UCHWYT NA BIDON

Uchwyt na bidon mieści standardowe butelki (dostępny dla wszystkich przystawek rowerowych Attitude).



// HAMULEC POSTOJOWY

Łatwy w obsłudze hamulec postojowy z blokadą dostępny jest w wersji standardowej wszystkich przystawek Attitude.

ATTITUDE

HYBRID – WSZECHSTRONNOŚĆ



Przystawka Attitude Hybrid łączy w sobie zalety zdrowotnej jazdy na rowerze z niezawodnością napędu.

Aby zmniejszyć zmęczenie, silnik można włączyć przed trudnym podjazdem pod górę lub zawsze wtedy, gdy wymagana jest większa prędkość jazdy.

Hybrid



MANUAL | HYBRID | POWER



// AKUMULATOR LITOWO-JONOWY

Akumulator litowo-jonowy 14,5Ah zapewnia dłuższy czas jazdy. Stopień naładowania akumulatora można sprawdzić na wyświetlaczu.



// MOCNY SILNIK 250 W

Silnik o mocy 250 W umożliwia jazdę z prędkością do 23 km/h, doskonale sprawdzając się na terenach górzystych i w trakcie dłuższych wypraw.



// PRAKTYCZNY UCHWYT NA SAKWY

Na uchwycie można zawiesić dowolne standardowe sakwy. Opcja ta dostępna jest dla wszystkich przystawek Attitude.



// ERGONOMICZNA KORBA V-CRANK

Ergonomiczne ustawienie uchwytu zapobiega kontaktowi z ciałem, szczególnie na zakrętach.

ATTITUDE

POWER – MOC



Attitude Power oferuje w 100% zasilany napęd, zapewniający wygodę użytkownika wózka inwalidzkiego. Przystawka odciąża górną połowę ciała, dzięki czemu użytkownik nie musi się już martwić podjazdami pod górę czy dużymi odległościami. Zamiast tego może się zrelaksować i cieszyć jazdą.

Power



MANUAL | HYBRID | **POWER**



// MOCNY SILNIK 250 W

Silnik o mocy 250 W umożliwia jazdę z prędkością do 23 km/h.



// REGULOWANA KIEROWNICA

Wysokość ergonomicznego uchwyty można regulować. Wyświetlacz pokazuje dostępne opcje sterowania.



// AKUMULATOR

LITOWO-JONOWY

Akumulator litowo-jonowy 13,4 Ah zapewnia długi czas jazdy. W akumulatorach litowo-jonowych nie występuje efekt pamięci.



// ZINTEGROWANA LAMPA PRZEDNIA

Jasna lampa przednia zasilana jest bezpośrednio z akumulatora.